

Eucalyptol

Solvente della Guttaperca

CE 2409

BLEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO
PRODOTTO PER SOLO USO DENTALE

COMPOSIZIONE: Olio di Eucalypto

USO

Il prodotto è inteso per rimuovere la guttaperca in casi di re-trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima del trattamento immergere la pipette di dotazione dell'alcol etilico,

1. Inserire 1-2 gocce di liquido nel canale con la pipetta in dotazione
2. Rimuovere la guttaperca
3. Usare un'altra dose di liquido se necessario
4. Se la guttaperca è ancora secca o fragile applicare il liquido nuovamente
5. Ripetere l'azione per quanto necessario

Il prodotto è inteso per uso multiplo eccetto le pipette che sono monouso, l'uso multiplo delle pipette può causare rischi di infezione.

CONTROINDICAZIONI

Non usare su pazienti con iper-sensibilità ai componenti del prodotto.

ATTENZIONE

Può causare irritazione alla membrane della mucosa del cavo orale, in caso di contatto lavare con abbondante acqua. Il prodotto può irritare gli occhi, in caso di contatto lavare con abbondante acqua e consultare un medico. Usare diga in gomma, occhiali ed indumenti protettivi quanto si usa il prodotto.

MANTENIMENTO

Conservare nella confezione originale a temperatura sotto i 25°C

Tenere lontana dalla portata dei bambini

La data di scadenza è indicata sulla confezione principale, una volta aperto il contenitore la data non cambia se chiuso correttamente dopo ogni uso.

GESTIONE DELL'IMBALLO

I contenitori vuoti vanno smaltiti con responsabilità

CONFEZIONE

Flacone da 10 ml di preparazione, pipette di applicazione



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85